

Gepan[®] instill

Effective GAG-replenishment



**Patient-
information**

For a colourful life



Denne patient information er en vejledning, som kan bruges under behandlingsperioden. Den er tænkt som et supplement til den information, der gives af lægen eller sygeplejersken.

Behandlingen følger en bestemt plan, som din læge informerer dig om.

Bagest i brochuren er der mulighed for at skrive spørgsmål og kommentarer til behandlingen eller sygdommen.

Din **Gepan**[®] instill Patientservice

TAK

Brochuren er udarbejdet i samarbejde med læger og sygeplejersker på flere af landets urologiske afdelinger.

Vi vil gerne sige tak for hjælpen, og håber brochuren bliver en god hjælp i forbindelse med brugen af **Gepan**[®] instill.

MERE INFORMATION

Besøg vores hjemmeside og få flere informationer om **Gepan**[®] instill

www.gepan-instill.com

Information om Gepan[®] instill til behandling af kroniske former for cystitis

Blærens funktion er at opsamle urin. Urinen indeholder mange affaldsstoffer, som kan give anledning irritation af blærevæggen.

For at beskytte blærevæggen imod disse irriterende affaldsstoffer, danner kroppen et beskyttelseslag, som ligger på overfladen af blærevæggen.

Hvis beskyttelseslaget er ødelagt, kan affaldsstofferne fra urinen komme i direkte kontakt med de dybere liggende lag i blærevæggen, og forårsage stærke smerter, sammentrækninger af blæren samt betændelsestilstande i blæren.

Har dette stået på igennem længere tid – flere år, bliver blæren efterhånden uelastisk.

Blæren bliver også efterhånden mindre, således at det er nødvendigt at tømme den ofte – både dag og nat.

Udover at beskytte blærens dybereliggende lag, hindres bakterier også i at sætte sig fast på blærevæggen og forårsage en urinvejsinfektion.

Hvordan bruges Gepan[®] instill?

Gepan[®] instill indeholder et stof, som kan erstatte beskyttelseslaget i blæren, hvis det ikke fungerer ordentligt.

Gepan[®] instill er en væske, som sprøjtes op i blæren ved hjælp af et kateter. For at få bedst mulig effekt skal væsken blive i blæren i så lang tid som muligt, dog i mindst 30 minutter. Herefter kan man gå på toilettet og tømme blæren.

I de første 4-6 uger bruges **Gepan[®] instill** én gang om ugen. Herefter foretages én blæreskylning om måneden.

En bedring i symptomerne betyder at behandlingen er vellykket, og behandlingen med **Gepan[®] instill** bør fortsætte. Behandlingen tilrettelægges efter, hvornår symptomerne vender tilbage efter hver blæreskylning.

Gepan[®] instill er veltolereret. Nogle vil dog opleve gener ved at få et kateter lagt op i blæren.

Gepan[®] instill gendanner det ødelagte beskyttelseslag i blæren

For eksempel ved Interstitiel Cystitis:

Interstitiel cystitis er en kronisk betændelsestilstand i blærevæggen, som ikke er forårsaget af bakterier. Der vil typisk optræde 3 hovedsymptomer, nemlig smerter i underlivsregionen, kraftig vandladningstrang samt en hyppig vandladning både dag og nat.

Endvidere ses en hyppigere tendens til blærebetændelse. Man er ikke sikker på, hvad årsagen til sygdommen er, men en del af årsagen er sandsynligvis beskyttelseslaget på blæresvæggen, som er defekt. **Gepan[®] instill** kan erstatte det manglende og ødelagte beskyttelseslag.

Andre sygdomme, hvor beskyttelseslaget også er ødelagt, og som derfor kan behandles med Gepan instill er...

Strålecystitis:

Dette er en kronisk betændelsestilstand i blæren, som skyldes strålebehandling af en cancer i underlivsregionen, f.eks. kræft i blærehalskirtlen hos mænd, livmoderkræft eller livmoderhalskræft hos kvinder, samt kræft i endetarmen.

Symptomerne er ofte de samme som ses ved interstitiel cystitis. Der er tillige ofte blødninger fra blærevæggen, og der kan forekomme en tiltagende stivhed af blæren. Hos nogle patienter udvikles betændelsen i blæren uheldigvis først efter flere måneder til mange år efter en strålebehandling.

Hyppige bakterieinfektioner i blæren:

Gentagne urinvejsinfektioner forårsaget af bakterier. Urinvejsinfektioner forekommer hyppigst hos kvinder, idet det korte urinrør gør det muligt for bakterier at få adgang til blæren.

De hyppigt forekomne urinvejsinfektioner ses ofte i sammenhæng med den ødelagte slimhinde inde i blæren – altså beskyttelseslaget. Det betyder at bakterier kan sætte sig fast på blærevæggen og forårsage en blærebetændelse. En akut infektion behandles med antibiotika.

Gepan instill er en mulig behandling i kombination med antibiotika eller som behandling i en symptomfri periode, idet **Gepan instill** kan nedsætte risikoen for, at bakterier sætter sig fast og forårsager en ny urinvejsinfektion.

Overaktiv blære syndrom:

Symptomerne på overaktiv blære syndrom svarer til symptomerne på interstitiel cystitis. Det kan således være svært at adskille de to sygdomme. Overaktiv blære syndrom er karakteriseret ved hyppige toiletbesøg – ofte ledsaget af stærk vandladningstrang.

Behandlingen rettes mod de forskellige årsager til den overaktive blære, og bliver ofte en kombination af flere behandlingsmuligheder.

Symptomerne på en overaktiv blære er i det væsentligste forårsaget af en u hensigtsmæssig sammentrækning af blæremuskulaturen eller et ødelagt beskyttelseslag på blærevæggen.

Er beskyttelseslaget ødelagt, vil affaldsstoffer i urinen kunne irritere nerveenderne. Dette giver bl.a. smerter og en stærk vandladningstrang.

Kontaktpersoner

Urolog: _____

Tlf: _____

Sygeplejerske: _____

Tlf: _____

Spørgsmål/Notater



Gepan® instill: 40ml steril natrium-kondroitinsulfat-opløsning (0,2%) instillation i blæren. Medicinsk udstyr til midlertidig erstatning af glykosaminoglykan-laget i blæren, f.eks ved interstitiel cystitis, strålecystitis, kronisk recidiverende cystitis eller overaktiv blære syndrom. G.Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt, Tyskland, Tlf: +49 4826 59-0, Fax: +49 4826 59-109, www.gepan-instill.com